


## Autoinyección con Gonal-f® RFF Pen—4 pasos fáciles

### 1 Conecte la aguja

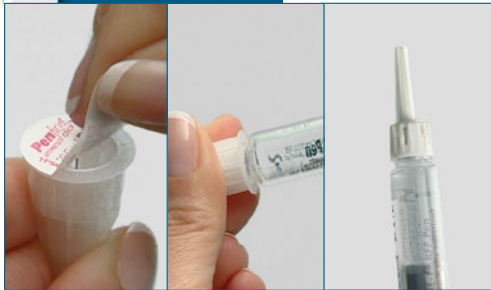

Retire la tapa del pen y limpie la punta de rosca con una alogodon con alcohol. Retire la lengüeta de la funda exterior de la aguja. Presione la punta con rosca del pen dentro del extremo abierto de la funda exterior de la aguja. Gire el pen en sentido horario hasta que la aguja esté bien conectada. Retire la funda exterior de la aguja.

### 2 Fije la dosis



Gire el selector de dosis de forma que su dosis recetada esté alineada con la flecha indicadora negra de la dosis.

● **Vuelva a comprobar que la dosis correcta del selector de dosis esté alineada con la flecha indicadora negra de dosis antes de proceder.**

**Si la dosis marcada es muy alta o muy baja, vuelva a fijarla antes de tirar el botón de inyección.**

### 3 Cargue y confirme




Cargue la dosis tirando el botón de inyección todo lo que pueda. Busque la última flecha roja plana plenamente visible en el botón de inyección. Esta flecha confirma que la dosis se ha cargado y está lista para inyectar. (Si la dosis cargada es menor que la dosis prescrita, no hay suficiente medicamento para una dosis completa. Use un nuevo Gonal-f® RFF Pen para completar la dosis. Consulte el dorso de esta página para obtener instrucciones más detalladas).

### 4 Aplique la inyección



**Nota: Lea las instrucciones antes de realizar la inyección.** Limpie el sitio de inyección recomendado con una alogodon con alcohol y déjelo secar al aire. Retire la funda interior de la aguja. **No toque la aguja ni deje que ésta toque ninguna superficie.** Inyecte la aguja en la piel en un ángulo de 90°. Presione el botón de inyección hasta el último click. Después del último click, mantenga la aguja en la piel durante por lo menos 5 segundos. Retire la aguja y aplique la presión necesaria con una gasa.

### Preparación del pen: Sólo para el primer uso

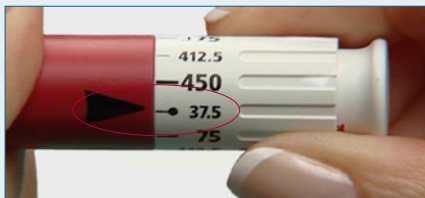

Siga las instrucciones para el Paso 1: Conecte la aguja. Fije el indicador de dosis en 37.5. Tire el botón de inyección todo lo que pueda. Retire la funda interior de la aguja y sostenga el pen de forma que la aguja apunte hacia arriba. Golpe suavemente el reservorio prellenado para dejar que las burbujas de aire que pudiera haber suban a la superficie. (Es normal que permanezcan algunas pequeñas burbujas de aire.)



Mantenga la aguja apuntando hacia arriba y presione el botón de inyección completamente. Sosténgalo hasta que escuche un click. Debe aparecer una pequeña cantidad de líquido en la punta de la aguja. (Si no saliera líquido, repita las instrucciones de preparación del pen hasta que salga.) Vuelva a colocar la funda interior de la aguja.


### Descarte



Sostenga el pen firmemente por el reservorio del medicamento y vuelva a colocar la funda exterior de la aguja. Tome firmemente la funda exterior de la aguja y desenrosque el pen de la aguja, girando el pen en sentido antihorario. Deseche la aguja en un recipiente seguro.

### Almacenamiento

Después de usar, vuelva a colocar la tapa del pen y guárdelo a temperatura ambiente o en el refrigerador hasta un máximo de 28 días.

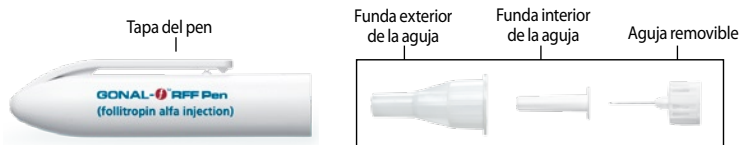

## Cuando necesita completar una dosis con un pen nuevo...



Quando tira hacia atrás el botón de inyección, si la última flecha roja plana visible **muestra un número inferior a la dosis prescrita**, no tiene suficiente medicamento para completar su dosis recetada. En este caso, siga las instrucciones a la derecha.

**1** En el área sombreada en rojo del cuadro, busque la dosis que queda en su pen actual.

### Dosis que queda en el pen actual

<b>37.5</b>	<b>75</b>	<b>112.5</b>	<b>150</b>	<b>187.5</b>	<b>225</b>	<b>262.5</b>	<b>300</b>	<b>337.5</b>	<b>375</b>	<b>412.5</b>

**2** Busque su dosis recetada en la columna debajo.

<b>Dosis recetada</b>	<b>450</b>	412.5	375	337.5	300	262.5	225	187.5	150	112.5	75	37.5
	<b>412.5</b>	375	337.5	300	262.5	225	187.5	150	112.5	75	37.5	
	<b>375</b>	337.5	300	262.5	225	187.5	150	112.5	75	37.5		
	<b>337.5</b>	300	262.5	225	187.5	150	112.5	75	37.5			
	<b>300</b>	262.5	225	187.5	150	112.5	75	37.5				
	<b>262.5</b>	225	187.5	150	112.5	75	37.5					
	<b>225</b>	187.5	150	112.5	75	37.5						
	<b>187.5</b>	150	112.5	75	37.5							
	<b>150</b>	112.5	75	37.5								
	<b>112.5</b>	75	37.5									
	<b>75</b>	37.5										

**3** Busque la intersección de "Dosis que queda en el pen actual" y "Dosis recetada". El número de la intersección indica la dosis que necesita marcar en un pen nuevo para completar su dosis recetada.



Atención compasiva, información educativa y asistencia con la medicación las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Sin cargo 1-866-LETS-TRY (1-866-538-7879)  
[www.fertilitylifelines.com](http://www.fertilitylifelines.com)



Videos instructivos sobre la medicación de fertilidad EMD Serono, disponibles en [www.fertilitylifelines.com](http://www.fertilitylifelines.com)